


Rollstuhl- und Insassensicherung RAS-Mobil



1. Kofferraumdeckel öffnen



2. Arretierung Rampe lösen

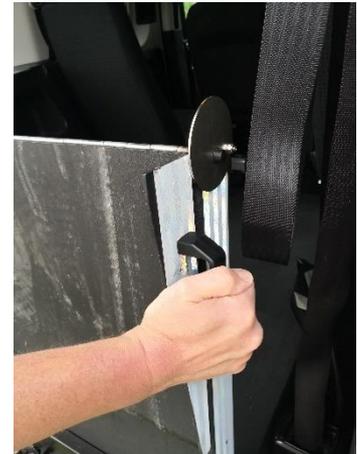


3. Rampe nur mit Hilfe der Griffe absenken
Klemmgefahr!



4. Rollstuhl positionieren
immer in Fahrtrichtung!



5. Knopf einschalten

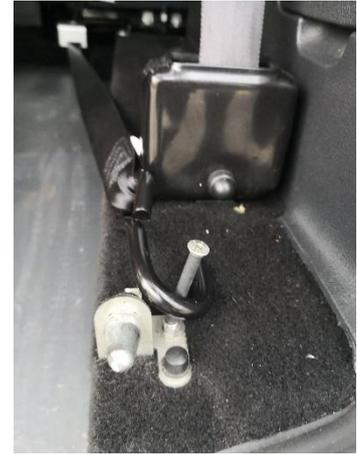

6. Vordere Befestigungshaken nehmen ...



7. ... und jeweils auf beiden Seiten vorne am Rollstuhlgestell einhaken



8. Rollstuhl in Fahrzeug schieben ...



9. ... bis zur hinteren Sitzreihe
Rollstuhlbremsen betätigen!



10. Knopf ausschalten



11. Hintere Befestigungshaken am Rollstuhlgestell einhaken



12. Gurte mittels Drehvorrichtung spannen



13. Insasse mit Gurt sichern



14. Rampe nur mit Hilfe der Griffe hochfahren ...
Klemmgefahr!



15. ... bis sie arretiert

Rollstuhl- und Insassensicherung LÖSEN



1. Zum Herunterfahren der Rampe Arretierung lösen



2. Insasse von Gurt lösen




3. Hintere Befestigungs-
haken vom Rollstuhl lösen



4. Befestigungsvorrichtung muss sich immer auf der Fahrzeug Innenseite befinden!



5. Knopf einschalten

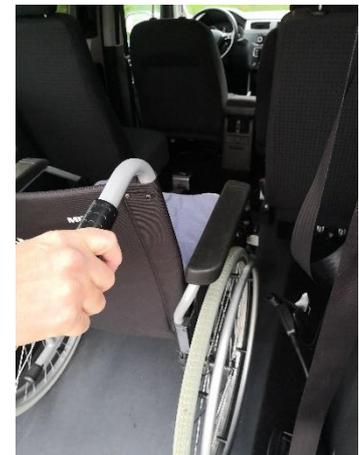

6. Rollstuhl aus Fahrzeug schieben



7. Vordere Befestigungs-
haken am vorgesehenen
Ort einhaken



8. Knopf ausschalten